

Cepillo para toma Microbiológica protegida

Este cepillo original permite efectuar las tomas microbiológicas a través del canal operador de un broncoscopio sin ningún riesgo de contaminación.

El cepillo se desliza en el interior de una primera vaina de teflón[®] cuya extremidad lleva un pequeño tapón a fin de evitar toda posibilidad de contaminación en el momento de su manipulación.

Este conjunto de cepillo y vaina se halla protegido por una segunda vaina de teflón[®].

Su manejo se halla facilitado por un anillo de presión.

Cuando el conjunto se halla correctamente posicionado en el árbol pulmonar para efectuar la toma, pulsar el cepillo a través de la vaina de protección, el tapón será así expulsado y se disolverá rápidamente, sin ningún riesgo de toxicidad. Una vez la toma terminada, se hará volver a subir el cepillo por la primera vaina de teflón[®], luego el conjunto por la segunda vaina de teflón[®], con el fin de evitar toda contaminación en el momento de su retiro.



Para la utilización de este cepillo, en el canal operador del broncoscopio deberá ser superior a 2 mm.

La extremidad perfectamente redondeada evita todo riesgo de traumatismo en el momento de la manipulación.

Este cepillo se halla embalado en un doble embalaje estéril, apirógeno, y es para utilización única.



Cepillo Citológico 9201

REFERENCIA: 9201.

DIÁMETRO DE CEPILLO: 1.0 mm.

DIÁMETRO DE VAINA: 1.8 mm.

LONGITUD: 90 cm.



Cepillo Citológico 9202

REFERENCIA: 9202.

DIÁMETRO DE CEPILLO: 1.7 mm.

DIÁMETRO DE VAINA: 1.8 mm.

LONGITUD: 90 cm.